



Procedimento para Higienização de Torquímetro CIRÚRGICO

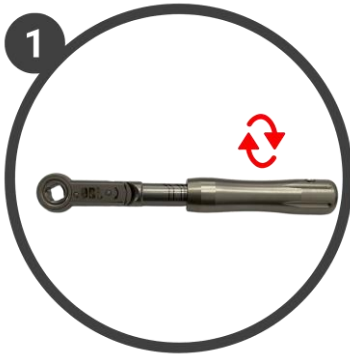

GIRE A HASTE EM SENTIDO ANTI-HORÁRIO



RETIRE A HASTE DE GRADUAÇÃO DE TORQUE, DEIXANDO O TORQUÍMETRO EM 3 PARTES;

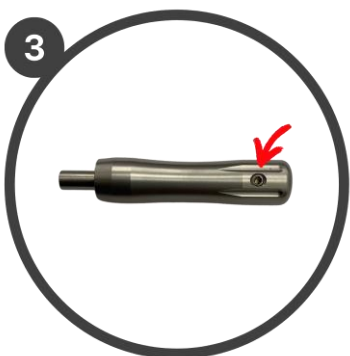

ATENÇÃO: O PARAFUSO NUNCA DEVE SER RETIRADO;



COM O INSTRUMENTO TOTALMENTE DESMONTADO, INICIE O PROCESSO DE LAVAGEM DA SEGUINTE FORMA:

- Imergindo as peças em solução aquosa de detergente com Ph neutro ou enzimático e colocá-las no ultrassom por 30 minutos;
- Em seguida, limpar as peças utilizando uma escova com cerdas macias, detergente e água corrente, esfregando cuidadosamente.